

AED遠隔モニタリングシステム

LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ
スタートアップガイド



LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャは、
当社が無償でご提供するサービスです。

AED遠隔モニタリングシステム LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャ概要

ライフリンクは、コネクテッドAEDの状態、付属消耗品（バッテリーや電極パッド）の有効期限を一元管理するWebツールです。

予め設定しておいたメールアドレス宛に、不具合情報や消耗品有効期限、使用時のお知らせを送付します。


お客様の日常点検を強力にサポートします。



メールお知らせサービス



複数名でAEDを管理

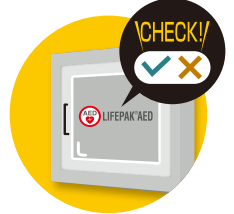

オンライン監視

お使いの前にはしていただきたいこと

1. ライフリンクのパスワード設定

ご注文時にお知らせいただいた電子メールアドレスにライフリンクから「LIFELINKcentral™へようこそ!」というご案内メールが届きます。メール内にあるURLをクリックしてパスワードの設定をしてください。パスワードの設定が完了すると、ライフリンクのトップページが表示されます。マイアカウントタブをクリックし、情報を確認することができます。

※登録情報に相違がある場合は、お問い合わせください。




LIFELINKcentral™へようこそ!
(ウェルカムメール)の例



ライフリンクログオン後の画面例

パスワード設定の流れ

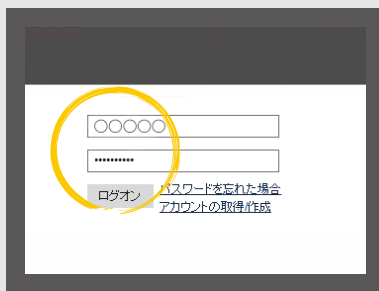

ログオン画面で仮ログオン名と仮パスワードを入力しログインします。



利用規約をお読みになり、承諾いただければ「同意する」ボタンをクリックします。



仮パスワードをご自身のご希望のパスワードに変更します。パスワードリセット時に必要な回答と、新パスワードを入力し、「送信」をクリックします。

2. コネクテッドAEDの通信接続の設定

ライフリンクへログオンし、リソースセンターからWi-Fi設定ツールをダウンロードできます。詳しくは、AED製品に同梱されている取扱説明書を確認し、AED本体のインターネット接続を完了させてください。



リソースセンターの画面

1. 装置ダッシュボードと詳細画面

① 装置の状態について、装置タブの中の円グラフ（ダッシュボード）にて表記します。緑（使用可能）、黄色（注意が必要）、赤（使用不可能）と色分けされており、管理している装置に何らかの注意や対処が必要なのかどうかを判別することが可能です。



② ダッシュボード内の「注意が必要です」をクリックすると、装置の詳細画面を表示することができます。詳細画面では、何が原因で注意が必要になったかを確認することができます。



2. 異常があった場合のお知らせメールの例

消耗品の期限が到来すると、ライフリンクから右の画面のようなお知らせメールが届きます。そこには、アカウント、設置先、装置、装置シリアル番号、準備状態などの情報が記載されています。異常のお知らせメールが届いた場合、ライフリンクにログオンしていただくと詳細を確認することができます。本メールが届きましたら、速やかに消耗品の交換をお願いします。



付属品(消耗品)有効期限到来メール

1. お知らせ設定の変更方法

- ① 画面の右上にあるマーク☰と「マイプロフィール」をクリックし、「マイプロフィール」を表示します。
- ② 画面の右上にある「お知らせ」マークをクリックし、次に「お知らせ設定の編集」マークをクリックします。
- ③ 「アカウントの設置先」「装置」「点検」タブから配信停止したいお知らせのチェックを外し、送信をクリックすると設定変更が完了します。



2. 消耗品有効期限間近メールが届いたら

- ① 消耗品の有効期限が90日以内になると、右の画面のようなお知らせメールが届きます。本メールが届きましたら、AEDを購入した販売代理店へ連絡し、新しい消耗品へ交換をお願いします。
- ② 新しい消耗品に交換したら、コネクテッドAEDのチェックイン操作を行ってください。チェックインの操作方法については、同梱されている取扱説明書でご確認ください。チェックインが完了すると、ライフリンクの装置画面で、新しい消耗品の有効期限に自動で変更されます。



消耗品交換前の画面



消耗品交換後の画面

1. 座標（緯度と経度）の設定



- ① 最初の座標は設置先の住所をもとに座標が割り当てられ、マップ上に表示します。コネクテッドAEDの場合は、正確な座標に設定していただくことを推奨しています。

装置の詳細画面の右上にある📍「装置マップ」マークをクリックし、「装置マップ」画面を表示します。

※設置先の画面でもお使いの装置の地域座標（緯度と経度）の設定ができます。

- ② 座標の設定を行います。マップにあるピンをドラッグして正しい座標に移動させます。

※左上の「地図」をクリックすると、地図でピンの位置を確認することができます。

座標の設定が完了したら、次にロケーションの設定へ進みます。



2. ロケーションの設定


- ③ ピンの移動が完了すると、ロケーションを入力する画面が表示されます。ロケーションに詳しい場所を入力します。

- ④ 座標とロケーションの設定が完了したら、✅「デバイスの座標を設定します」マークをクリックして設定を保存し、右上の✕をクリックして装置マップの画面を閉じます。

3. ヘルプ機能（操作マニュアル）

画面の右上にある❓「ヘルプ」マークをクリックすると、詳しい操作方法を確認することができます。





AED self-monitoring Start-up Guide

LIFELINKcentral™ AED PROGRAM MANAGER

ライフリンクのサービスはwebブラウザやスマートフォン・タブレットでご利用頂けます。

- 【推奨環境】
- パソコン(Windows、Mac)
 - Internet Explorer 10.0以上
 - Safari 5.0以上
 - Google Chrome 最新版(version 43.0.)

※スマートフォンなどのモバイルデバイスからではライフリンクが提供する全ての機能をご利用頂けない場合があります。

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー



0120-715-545

平日9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)