

# LIFELINKcentral™ AED プログラムマネージャ

## 【操作手順】消耗品期限の更新

### <事前にAED本体をご確認ください>

- ①装着されている消耗品の有効期限（年月日）
- ②装置の準備状態を示すインジケータの表示

## 1 LIFELINKcentralへログオンします。

<URL> <https://lifelink-jp.lifenetsystems.com>

ログオン名

パスワード

ログオン

[パスワードを忘れた場合  
アカウントの取得/作成](#)

## 2 メインメニューから「装置」をクリックします。

アラート

マイアカウント

設置先 1

設置先使用可能 0 / 1

● 使用不可能 1

装置 1

担当者 1

リソースセンター

設置先

下のリストを検索するには、テキストを入力してください。

【デモ】〇〇株式会社 (BB057435)

住所 後楽24  
文京区

主要設置管理担当者 〇〇△△

電話番号 03-1111

電子メール medica

使用不可能 (デバイス)

## 3 更新したい装置をクリックします。

アラート

マイアカウント

設置先 1

装置 1

装置の管理 >

AED 使用可能 0 / 1

● 使用不可能 1

担当者 1

リソースセンター

装置

点検

下のリストを検索するには、テキストを入力してください。

【デモ】〇〇株式会社 (BB057435)

LIFEPAK CR2 (46736202)

場所が指定されていません

バッテリー CR2 リチウムバッテリー (2023/01/25)

電極 CR2 QUIK-STEP 電極、成人/小児/幼児用 (2022/11/08)

使用不可能 (電極が期限切れ)

### 複数台お持ちの場合

装置

点検

下のリストを検索するには、テキストを入力してください。

【デモ】〇〇株式会社 (BB057435)

LIFEPAK CR2 (46736202)

場所が指定されていません

バッテリー CR2 リチウムバッテリー (2023/01/25)

電極 CR2 QUIK-STEP 電極、成人/小児/幼児用 (2022/11/08)

使用不可能 (電極が期限切れ)

samaritan PAD 360P (HS0000001)

場所が指定されていません


付属品キット Pad-Pak (2021/05/07)

使用不可能 (パッドバック 期限切れ)

**4 「点検」→「点検の実行」の順にクリックし、点検の実行画面をひらきます。**



**5 「付属品」をクリックします。**

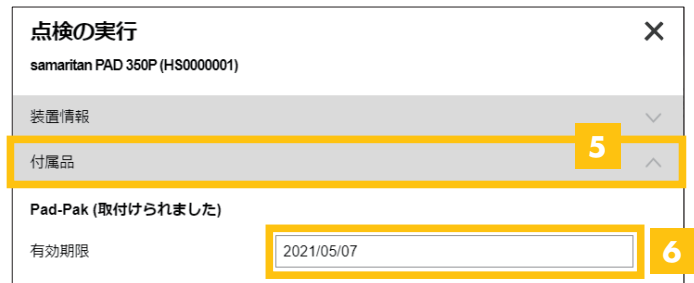

**6 古い消耗品の有効期限を削除し、新しい有効期限を入力します。**

**7 「点検チェックリスト」をクリックします。**



**8 目視で確認したインジケータの状態を選択し、「送信」をクリックします。**

インジケータ表示は機種により異なります。  
(右図はサマリタンPADシリーズ)

**9 使用可能の表示を確認し、完了です。**



**日本ストライカー株式会社** メディカル事業部  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは

**0120-715-545** 平日9:00~17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)

消耗品期限の更新  
管理番号等: PCJMK23-0302-01