

LIFELINKcentral™ AED プログラムマネージャ

【操作手順】点検記録の残し方

<LIFELINKcentralを活用した点検記録>

厚生労働省はAED設置者に対して、点検担当者を配置し、日常点検を実施するよう求めています。LIFELINKcentralに点検記録を入力することで、装置の状態や消耗品の期限を一元管理できます。また必要に応じて後から点検記録の履歴を確認したり、Exce出力することもできます。

1 LIFELINKcentralへログオンします。

<URL> <https://lifelink-jp.lifenetsystems.com>

ログオン名

パスワード

ログオン

パスワードを忘れた場合
アカウントの取得/作成

2 メインメニューから「装置」をクリックします。

3 更新したい装置をクリックします。

複数台お持ちの場合

4 「点検」→「点検の実行」の順にクリックし、点検の実行画面をひらきます。



5 「点検チェックリスト」でインジケータの状態を選択し、「送信」をクリックします。

インジケータ表示は機種により異なります。
(右図はサマリタンPADシリーズ)



6 使用可能の表示を確認し、完了です。

使用可能以外の場合は表示されるエラーメッセージをご確認ください。



日本ストライカー株式会社 メディカル事業部
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは

0120-715-545 平日9:00~17:00
フリーコール (土日、祝日、年末年始を除く)

消耗品期限の更新
管理番号等: PCJMK23-0306-01