

LIFELINKcentral™ AED プログラムマネージャ

【操作手順】点検記録の残し方 ～一括点検～


<設置先単位でAEDの点検記録を残す>

複数のAEDの準備インジケータが全て「使用可能」の場合、一括で点検記録を残すことができます。


1 LIFELINKcentralへログオンします。

<URL>

https://lifelink-jp.lifenetsystems.com

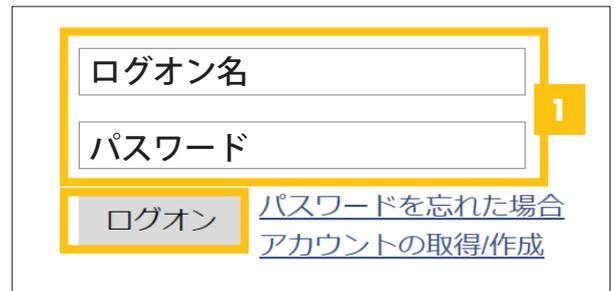

2 メインメニューから「設置先」をクリックします。

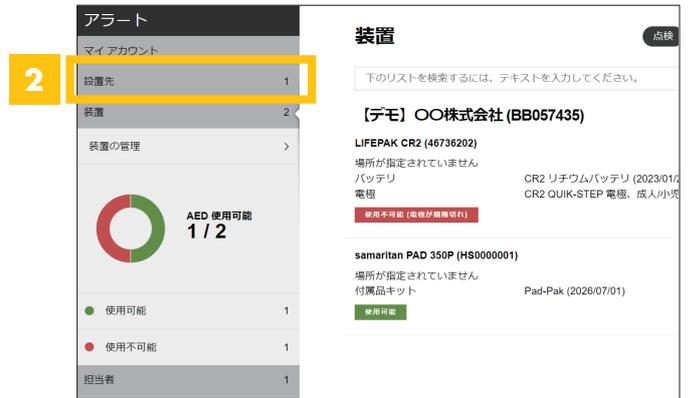

3 記録を残したい設置先をクリックします。




4 「AED点検の実行」をクリックします。



5 「すべて点検」をクリックします。



6 点検の完了画面がでたら「はい」をクリックします。

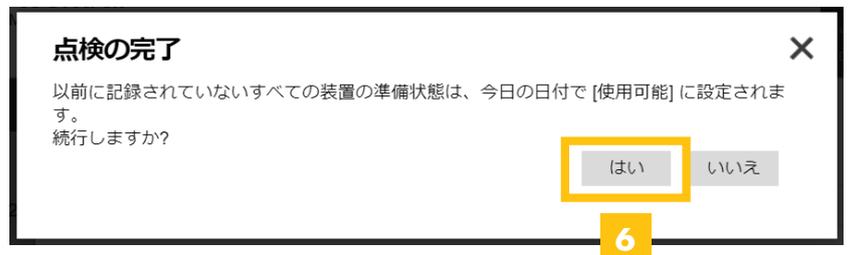

7 使用可能の表示を確認し、完了です。

使用可能以外の場合は表示されるエラーメッセージをご確認ください。



日本ストライカー株式会社 メディカル事業部
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは

フリーコール 0120-715-545 平日9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

点検の実行～一括点検～
管理番号等：PCJMK23-0306-02