

Front

ライフバック CR2
オートショック

stryker

一次救命処置

1. 反応があるかを確認する

傷病者の肩を軽くたたいてください。傷病者に大きな声で呼びかけてください。



2. 応援を求める

119番に通報してください。
他の人に応援を求めてください。

3. 心肺蘇生 (CPR) を始めてください (AEDが手元に届くまで)

傷病者の胸を、1分間に100回～120回の速さで、胸が約5cm沈むように、強く、早く、絶え間なく圧迫します。胸骨圧迫を30回行うごとに、2回の人工呼吸を行います (人工呼吸を行うことに不安があるときは、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫を続けてください)。



AED操作の手引きは裏面にあります

バッテリー使用期限	年	月	日
電極パッド使用期限	年	月	日

ライフバック CR2 オートショック クイックユーザガイド LPCR-049-A

Rear

ライフバック CR2
オートショック

stryker

一次救命処置


4. AEDの電源をオンにする

AEDのフタを開け、音声ガイドの指示にしたがってください。



5. 電極を装着する

赤いハンドルを引き、平行に並べられている電極をそのまま絵のとおり傷病者の胸に貼ってください。

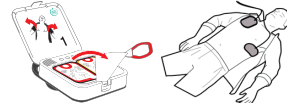

6. 電気ショックを施す

傷病者から離れてください。

電気ショックが必要と判断された場合、AEDが自動で電気ショックを実施します。

※電気ショック前に傷病者に触れていないことを警告するアナウンスとショックインディケータの点滅にてショックの実施をお知らせします。



販売名: ライフバックCR2 オートショック
承認番号: 30300BZX00353000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

ライフバック CR2 オートショック クイックユーザガイド LPCR-049-A